


BRIZGALKA ZA OKSALNO KISLINO 1-5 ML, AVTOMATSKA
ARTIKEL: 7810, 7809

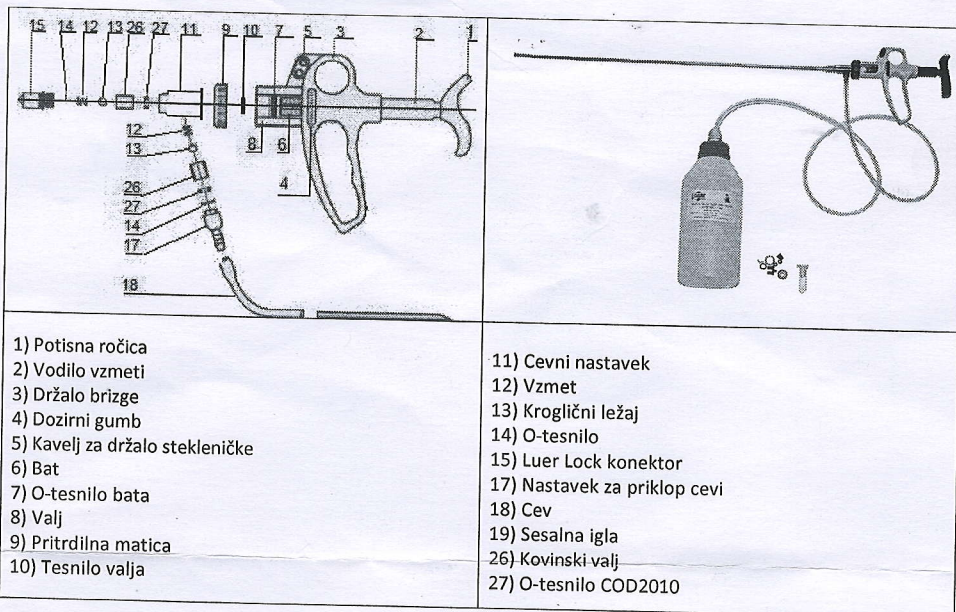

NAVODILA

Potrebno količino oksalne kisline nalijte v plastenko in dobro zaprite pokrovček. En konec cevi (18) pritrđite na nastavek za priklop cevi (17), drugi konec pa na sesalno iglo (19). Sesalno iglo vstavite v plastenko. Bodite pozorni, da je sesalna igla vstavljena do dna plastenke, drugače ne boste mogli izsesati vse tekočine. Injekcijsko iglo vstavite v Luer Lock konektor. Količino doziranja (od 0 do 5 ml) nastavite z vrtenjem dozirnega gumba (4). Pri doziranju morate potisno ročico (1) prijeti po celi dolžini, da se pritisk na ročico enakomerno porazdeli.

VZDRŽEVANJE

Brizgalko morate po vsaki uporabi vedno sprati z vodo. V plastenko nalijete vodo in jo izbrizgate, dokler ni brizgalka popolnoma čista. Ko se posuši, nanesite nekaj kapljic silikonskega olja (priložen) na ležaj (13), O-tesnilo (14), bat (6) in O-tesnilo bata (7). To naredite tako, da pritrdilno matico (9) odvijete (pazite, da ne izgubite tesnila (10)) ter na obeh straneh v luknjici kanite po dve kapljici silikonskega olja.

V kolikor brizgalko razstavite, jo ponovno sestavite po priloženi skici in pri tem pazite, da ne izgubite majhnih delčkov. Pomembnejši rezervni deli so priloženi.

Brizgalka je namenjena samo za zdravljenje čebel z oksalno kislino! Pri tem je potrebno upoštevati varnostna opozorila za zdravljenje z oksalno kislino.



Logar trade d.o.o. Poslovna cona A 41, SI-4208 Šenčur, Slovenija
 tel.: 04 25 19 410, faks: 04 25 19 415
 www.logar-trade.si